

Содержимое набора

- Контейнер
- Бумажное кольцо
- Закрывающийся пакет

Условия хранения контейнера

При температуре от +15 до +25 °С. Краткосрочное изменение температуры при перевозке не повлияет на образец.

Биоматериал хранится в течение 2 месяцев с момента сбора.

Рекомендации по сбору

Приступайте к сбору материала в случае отсутствия симптомов кишечных расстройств, не менее чем через 3 месяца после приема антибиотиков и противовирусных препаратов и не менее чем через 3 недели после приема нестероидных противовоспалительных средств и хирургических вмешательств.

Также не рекомендуется сдавать тест беременным, онкологическим больным и людям с серьезными сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, почек или печени; церебральной ишемией; заболеваниями крови; декомпенсированным сахарным диабетом и остальными патологиями.


Внимание!

Не употребляйте внутрь жидкость из контейнера.


При попадании жидкости из контейнера на кожу или слизистые оболочки промойте эти места водой.



1. Зарегистрируйте личный кабинет на сайте atlas.ru. Там вы сможете отслеживать статус исследования

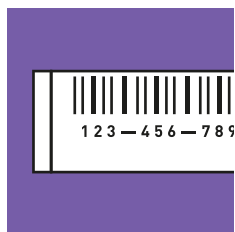


2. Введите номер контейнера в соответствующее поле личного кабинета на atlas.ru

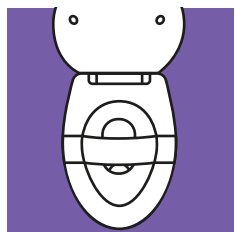

3. Наденьте бумажную ленту на сиденье унитаза, как показано на рисунке



4. Просто следуйте указаниям на рисунке

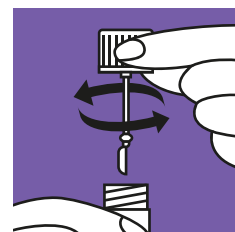

5. Аккуратно откройте контейнер и достаньте лопатку, прикрепленную к крышке. Держите контейнер вертикально



6. Лопаткой соберите материал с трех разных участков и поместите в контейнер. Заполните его до линии




7. Убедитесь, что содержимое — биоматериал и консервант — не выше линии, указанной на контейнере. Перемешайте лопаткой



8. Плотно закройте крышку. Встряхивайте контейнер с образцом в течение 30 секунд



9. Избавьтесь от бумажной ленты. Надорвите ленту с двух сторон и смойте ее — она вам больше не понадобится

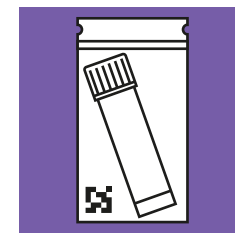

10. Поместите контейнер в пакет. Плотно закройте его



11. В личном кабинете на сайте atlas.ru нажмите кнопку «Вызвать курьера»



12. После передачи пакета вы можете отслеживать статус исследования и заполнить опросник по образу жизни в личном кабинете на сайте atlas.ru