

Условия хранения контейнера

При температуре от -20 до +50°C.
Биоматериал сохраняется в течение трех лет с момента сбора.

Рекомендации по использованию


Не удаляйте пленку с внутренней стороны крышки контейнера и не закрывайте ее до момента наполнения.




Не употребляйте внутрь жидкость из контейнера. При попадании на кожу или слизистые оболочки промойте эти места водой.




1
Ополосните рот чистой водой. Затем, в течение 30 минут не ешьте, не пейте, не жуйте жвачку, не целуйтесь и не курите. Не собирайте биоматериал натошак

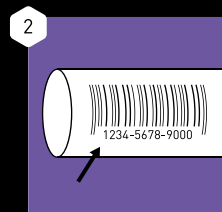


2
Зарегистрируйтесь на atlas.ru. В личном кабинете в соответствующее поле введите номер контейнера

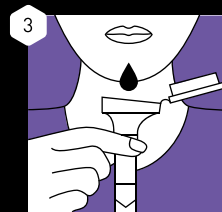


3
Заполните контейнер до линии. Не страшно, если над линией будут пузыри. Как правило, для выделения такого количества слюны требуется 2–5 минут

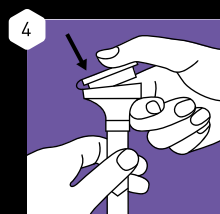

4
Закройте крышку до щелчка — в контейнер выльется консервант, который сохранит ваш биоматериал

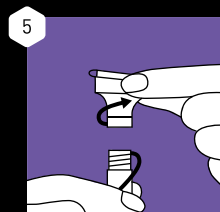


5
Откройте воронку, закройте контейнер колпачком. Держите контейнер вертикально

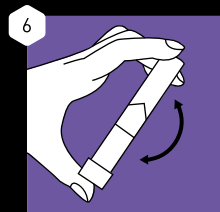

6
Встряхните и поместите контейнер в пакет. Перед встряхиванием убедитесь, что он плотно закрыт



7
В личном кабинете на сайте atlas.ru нажмите кнопку «Вызвать курьера»

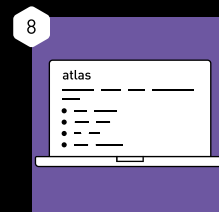

8
После передачи контейнера курьеру вы можете отслеживать статус в личном кабинете на сайте atlas.ru